

PROVTAGNINGSSANVISNINGAR

NEUROPEPTIDER

PLASMA

Proverna tages **fastande**.

Inget födoämnes- eller nikotinintag under 4 timmar före provtagningen.

Proverna tages i EDTA rör:	ACTH	minst 3 mL
	ADH (AVP)	minst 6 mL
	NPY	minst 3 mL
	Oxytocin (OT)	minst 6 mL
	PP	minst 3 mL

Provbehandling:

Proverna kyls omedelbart i isbad. Centrifugeras vid +4°C, minst 2500 x g i 10 minuter. Plasman överförs i plaströr och fryses inom 1 timme efter provtagningen.

URIN

Urin (5-10 mL) överförs i plaströr och fryses inom 1 timme efter provtagningen.

Peptider förvaras vid -20°C. Sändes fruset med kolsyreis.

Alla prover sändes till:

**Neurokemi, Hus V3
Laboriemedicin / Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Mölndal
431 80 MÖLNDAL**

Kompletterande uppgifter kan lämnas på tel: 031 - 343 23 68 eller 343 00 25