

En ny förenklad etikett ersätter ”den gamla flaggetiketten” för prover till Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Denna etikett används när LabBest är *ur funktion* eller provtagande enhet inte kan använda programmet LabBestOrderAndReply.

Denna etikett ersätter gamla flaggetiketter, och kan också med fördel även användas då patienten ska gå till provtagningscentralen för provtagning. Detta för att ytterligare öka patientsäkerheten inför provtagning.


Etiketten ifylls med bläckpenna, Texta:

- **Kundkod** (beställande enhet) användes vid analysbeställning till Klinisk Kemi. Analysresultatet går hit. Vid oklarheter om vilken er kundkod är eller om ni behöver veta någon annans kundkod kontakta laboratoriet på telefonnummer: 342 13 25, 343 49 61 eller 343 11 57
- **Datum och Klockslag** anges för provtagningen
- **Personnr.** personnummer anges.
- **Läk.**(läkarnamn eller annan ordinerande) anges om det önskas på analyssvaret.
- **Namn** skriv efternamn följt av förnamn.
- **Provtag. enhet.** Kundkoden för provtagande enhet anges *endast om det ej är samma som beställande enhet.*
(I exemplet nedan är s21 beställaren men patienten tog provet på åbyalm)
- **Analys.** Ange önskade analyser som kan provtas i samma rör. (får inte analyserna plats på raden så fortsätt på raden under.
- **Sign.** Provtagarens signatur.

12345678910	Kundkod	s21	Dat	090623	Kl	08.30	12345678910
	Personnr.	121212-1212	Läk	BG	Provtag. enhet	åbyalm	
	Namn	Krank Kalle	Analys	Hb, LPK, TPK	Sign	IU	
	Sahlgrenska Universitetssjukhuset						

Etiketten sätts på röret enligt följande:

- Tag bort skyddspappret under den vänstra delen av etiketten (ej hela skyddspappret).
- Fäst vänstra etikettdelen utan skyddspapper mitt på röret enligt bild.
- Rulla resterande etikett runt röret.
- Följ gällande transportregler

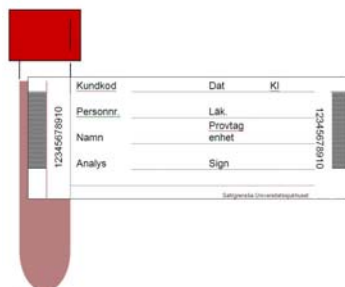

Artikelnummer Regionservice Inköp
923244 Etikett självh analys rutin
100x40mm m streckkod 100st/rle

923245 Etikett självh analys AKUT
100x40mm m streckkod 50st/rle